

KOMPRESJONSTØY

- etter kirurgiske inngrep



Medistim Norge fører et bredt sortiment av BH og kompresjonstøy fra VOE til bruk etter kirurgiske inngrep. Vi er behjelpelig med å finne riktig produkt til bruk etter operasjon, i samarbeid med din lege.

Bruk av kompresjonstøy hindrer unødvendig hevelse og blødning i behandlingsområdet etter operasjon, og den postoperative tilhelingen forkortes. Bruk av kompresjonstøy vil indirekte være smertelindrende. Det er viktig at du følger legens råd og veiledning ved bruk av kompresjonstøy, for å oppnå best mulig resultat.

Vårt kompresjonstøy er laget av spesielt egnet elastisk materiale som tillater huden å puste. Tøyet inneholder ikke latex.

NB! Det er viktig å få tatt målene dine før operasjonen, fordi du etter operasjonen vil ha hevelse og i mange tilfeller være sår og lite bevegelig. Ved kjøp av kompresjonstøy eller BH anbefales bestilling minimum 10-14 dager før operasjonen. Dersom det er nødvendig kan vi også sy tøy etter mål (leveringstid ca 14 dager).

MEDISTIM

Kompresjon - BH




BH modell MIMA

Art.nr. 2001N (hvit)
Art.nr. 2001N-2 (sort)

Postoperativ BH til bruk spesielt etter brystreduksjon og proteseoperasjoner. Komfortabel BH som gir god støtte og kompresjon. Justerbare skulderstropper med borrelås. Lukkes med glidelås foran.

med borrelås. Lukkes med glidelås foran.

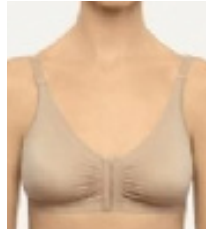

BH modell MIMI

Art.nr. 2049 (kun beige)

BH til bruk etter brystrekonstruksjoner med eget ved og innlegg av brystekspander. Egner seg IKKE etter innlegg av proteser eller etter brytreduksjoner. Myk og behagelig BH som

gir støtte uten for mye kompresjon. Laget av microfiber. Justerbare skulderstropper og lukking med hekker foran. Gir god støtte høyt under armen.



BH modell NUHA COBRE og EBANO

Art.nr. 2011VF COBRE (hvit)
Art.nr. 2020VF EBANO (sort)

Postoperativ BH til bruk etter brystoperasjoner. Egner seg IKKE etter brystreduksjoner. Komfortabel BH som gir god støtte.

Justerbare skulderstropper og justering med hekker i ryggen. Lukkes med glidelås foran.



BH modell COMFORT

Art.nr. 2045 (hvit)
Art.nr. 2045-2 (sort)

BH spesielt egnet ved brystrekonstruksjoner med eget vev og innlegg av brystekspander. Egner seg IKKE etter innlegg av proteser

eller etter brystreduksjoner. Myk og behagelig BH uten stor kompresjon, press eller trykk. Laget av microfiber. Justerbare skulderstropper og justerbare hekker i ryggen.

For å finne riktig størrelse på BH, se måletabell C på side 10.

Kompresjon - Brystbånd



BRYSTBÅND one size (dame)

Art.nr. 2005 (hvit)
Art.nr. 2005S (beige)
Art.nr. 2005N (sort)

Brukes etter brystoperasjoner. Festes med borrelås.



BRYSTBÅND Anatomisk (dame)

Art.nr. 2105 (hvit)

Anatomisk brystbånd for å unngå gnissning mot arm og armhule.

Kompresjon - Bukser



KOMPRESJONSBUKSE MED HØYTT LIV

Art.nr. 3007W (beige)
Art.nr. 3007W-2 (sort)

Kompresjonsbukse - trusemodell. Lukkes med hekker foran. Til bruk etter fett-suging og mage-/hofteplastikk ved mindre inngrep.



KOMPRESJONSBUKSE - under kne lengde

Art.nr. 3006 (beige)
Art.nr. 3006-2 (sort)


Kompresjonsbukse med ben under kne lengde. Lukkes med hekker foran. Åpent skritt. Til bruk etter fett-suging og mage-, hofte-, lår- og kneplastikk.



KOMPRESJONSBUKSE - over kne lengde

Art.nr. 3002 (beige)
Art.nr. 3002-2 (sort)

Kompresjonsbukse med korte ben - over kne lengde. Lukkes med hekker foran. Åpent skritt. Til bruk etter fett-suging og mage-, hofte- og lårplastikk.

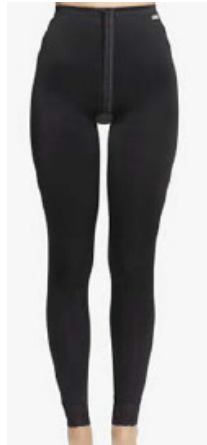

KOMPRESJONSBUKSE - ankellengde

Art.nr. 3011 (beige)
Art.nr. 3011-2 (sort)

Kompresjonsbukse med lange ben - ankellengde. Lukkes med hekker foran. Åpent skritt. Til bruk etter fett-suging og mage-, hofte-, lår-, kne- og leggplastikk.

For å finne riktig størrelse på kompresjonsbukse, se måletabell A side 10.

Medistim Norge fører et bredt utvalg av kompresjonstøy. I denne folderen presenterer vi et begrenset utvalg. Finner du ikke det du er på jakt etter, ta kontakt med en av våre forhandlere eller Medistim Norge. Vi hjelper deg med å finne riktig produkt til ditt behov. Sortiment og priser kan variere mellom de ulike forhandlerene. Se baksiden for oversikt over forhandlere.

Kompresjon - Body




BODY MED EKSTRA KOMPRESJON

Art.nr. 4002KT-2 (kun sort)

Body spesielt fremstilt til bruk etter mageplastikk og ved brystrekonstruksjon når man bruker eget vev fra mage. Ekstra kompresjon på nedre delen av magen. Egner seg IKKE til bruk etter

stropper som kan tas av. Lukkes med borrelås på sidene og i skrittet.

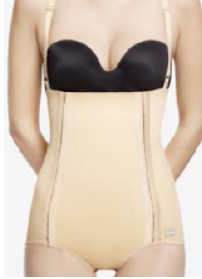

BODY MED STROPPER OG HEKTEREKKER

Art.nr. 4008-2 (sort)

Art.nr. 4008 (beige)

Kompresjon til mage og hofter. Lukkes med to hekterekker foran. Hekter i skrittet. Justerbare stropper. Hovedsakelig til bruk etter store fettsuginger på mage. IKKE

egnet etter stor mageplastikk.




BODY MED STROPPER OG HEKTER

Art.nr. 3007 (beige)

Art.nr. 3007-2 (sort)

Kompresjon til mage og hofter. Justerbare stropper. Lukkes med hekter foran og i skrittet. Til bruk etter fettsuging og mage-/hofteplastikk.

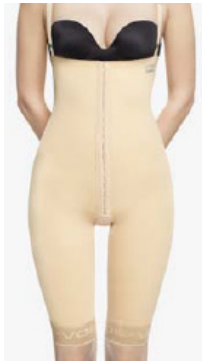


BODY MED BEN - over kne lengde

Art.nr. 3004 (beige)

Art.nr. 3004-2 (sort)

Kompresjon til mage, hofter og øvre del av lår. Justerbare stropper. Lukkes med hekter foran. Åpent skritt. Til bruk etter fettsuging og mage-, hofte- og lårpplastikk.

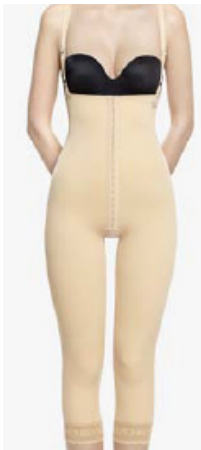


BODY MED BEN - under kne lengde

Art.nr. 3009 (beige)

Art.nr. 3009-2 (sort)

Kompresjon til mage, hofter, lår og knær. Justerbare stropper. Lukkes med hekter foran. Åpent skritt. Til bruk etter fettsuging og mage-, hofte-, lår- og kneplastikk.

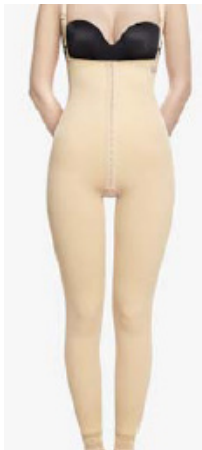


BODY MED BEN - ankellengde

Art.nr. 3012 (beige)

Art.nr. 3012-2 (sort)


Kompresjon til mage, hofter, lår, knær og legger. Justerbare stropper. Lukkes med hekter foran. Åpent skritt. Til bruk etter fettsuging og mage-, hofte-, lår-, kne og leggplastikk.

Kompresjon - Body

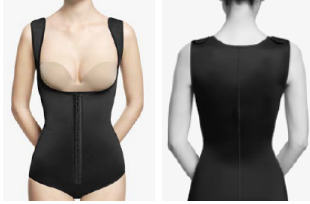


BODY MED MAGE- OG RYGGKOMPRESJON - ben over kne
Art.nr. 3007E (beige)
Art.nr. 3007E-2 (sort)

Kompresjon til mage, hofter og rygg. Justerbare brede stropper med borrelås. Lukkes med hekter foran og i skrittet. Til bruk etter fettstuging og mage-, hofte- og ryggplastikk. Brukes også etter rekonstruksjonskirurgi.

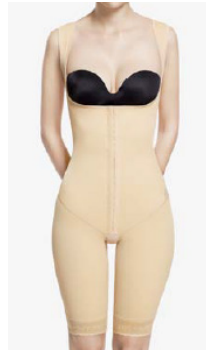


BODY MED MAGE- OG RYGGKOMPRESJON - ben over kne
Art.nr. 3004E (beige)
Art.nr. 3004E-2 (sort)

Kompresjon til mage, hofter, lår og rygg. Justerbare brede stropper med borrelås. Lukkes med hekter foran. Åpent skritt. Til bruk etter fettstuging av mage, hofter, innside lår og rygg. Også til bruk etter rekonstruksjonskirurgi.

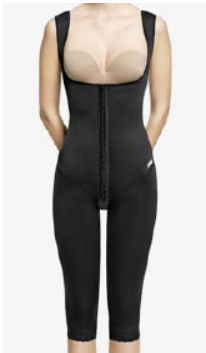


BODY MED MAGE- OG RYGGKOMPRESJON - ben under kne
Art.nr. 3009E (beige)
Art.nr. 3009E-2 (sort)

Kompresjon til mage, hofter og rygg. Justerbare brede stropper med borrelås. Lukkes med hekter foran. Åpent skritt. Til bruk etter fettstuging og mage-, hofte-, lår-, kne- og ryggplastikk. Også til bruk etter rekonstruksjonskirurgi.

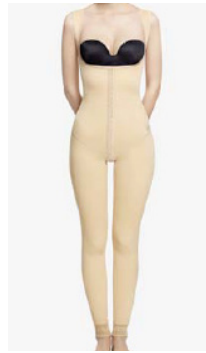

BODY MED MAGE- OG RYGGKOMPRESJON - ankellengde
Art.nr. 3012E (beige)
Art.nr. 3012E-2 (sort)


Kompresjon til mage, hofter, lår, knær, legger og rygg. Justerbare brede stropper med borrelås. Lukkes med hekter foran. Åpent skritt. Til bruk etter fettstuging og mage-, hofte-, lår-, kne og leggplastikk. Også til bruk etter rekonstruksjonskirurgi.

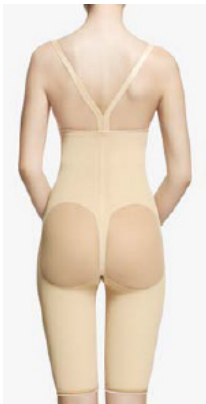

BODY - uten kompresjon i rumpe. Over kne lengde
Art.nr. 3104 (beige)
Art.nr. 3104-2 (sort)

Kompresjon til mage og lår. Justerbare stropper. Lukkes med hekter foran. Åpent skritt. Til bruk etter fettstuging og mage- og lårplastikk.

Spesialplagg for fetttransplantasjon til rumpe. Under kne lengde
Art.nr. 3109 (beige)
Art.nr. 3109-2 (sort)

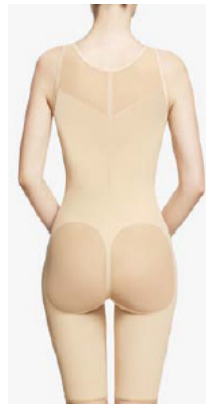

BODY MED RYGGKOMPRESJON - uten kompresjon i rumpe. Over kne lengde

Art.nr. 3104E (beige)
Art.nr. 3104E-2 (sort)
Kompresjon til mage, rygg og lår. Justerbare brede stropper. Lukkes med hekter foran. Åpent skritt. Til bruk etter fettstuging og mage-, rygg- og lårplastikk.
Spesialplagg for fetttransplantasjon til rumpe. Under kne lengde
Art.nr. 3109E (beige)
Art.nr. 3109E-2 (sort)

For å finne riktig størrelse på bodyene, se måletabell A på side 10.


Kompresjonstøy for menn



KOMPRESJONSVEST

Art.nr. 2006 (beige)
Art.nr. 2006-2 (sort)

Kompresjonsvest til menn. Brukes etter brystoperasjoner. Lukkes med borrelås. Kan brukes begge veier.

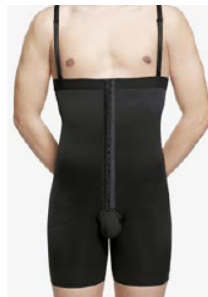

BODY MED BEN

Art.nr. 5008 (beige)
Art.nr. 5008-2 (sort)

Body med avtagbare stropper med ben til bruk etter fettsugning og brystoperasjon. Lukkes med hekker foran. Åpent skritt.



BODY MED BEN OG RYGGKOMPRESJON

Art.nr. 5006 (beige)
Art.nr. 5006-2 (sort)



Body med ben til bruk etter fettsugning og brystoperasjon samt ved behov for kompresjon på ryggen. Lukkes med hekker foran. Åpent skritt.



BRYSTBÅND

Art.nr. 4015S (beige)
bredde 15 cm
Art.nr. 4013S (beige)
bredde 24 cm

Brystbånd til menn etter brystoperasjon. Lukkes med borrelås.

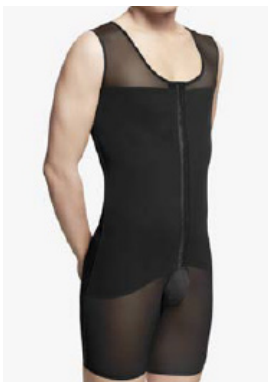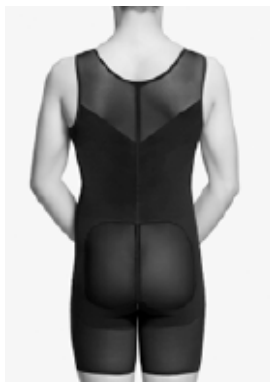

BODY MED RYGGKOMPRESJON

- uten kompresjon i rumpe.

Over kne lengde.

Art.nr. 5106 (beige)
Art.nr. 5106-2 (sort)

Body med ben til bruk etter fettsugning og brystoperasjon samt ved behov for kompresjon på ryggen. **Spesialplagg for fetttransplantasjon til rumpe.** Lukkes med hekker foran. Åpent skritt.

KOMPRESJONSBUKSE - MENN

Kompresjonsbukser til menn blir sydd etter mål. Samme type bukser som damebuksene på side 3, men uten blonder. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for veiledning. Leveringstid ca 14 dager.

For å finne riktig størrelse for herretøy og brystbånd, se måletabell E side 11.

Magebelte - armkompresjon



MAGEBELTE med 2 eller 3 panels lukking (Unisex)

Art.nr. 4023S - (Høyde 24cm)

Art.nr. 4034S - (Høyde 32cm)

Til bruk etter mageplastikk, magebrokk og ved andre store mageoperasjoner (ikke fettsuging). Lukkes med 2 eller 3 paneler med borrelås for bedre tilpasning. Stivere og tykkere kompresjonstøy enn body.



KOMPRESJON TIL ARMER - (unisex)

Art.nr. 1008Z (beige)

Til bruk etter fettsuging og/eller armpplastikk. Med glidelås på armer. Hekter bak.



KOMPRESJON TIL ARMER/RYGG - (dame)

Art.nr. 1009Z (beige)

Art.nr. 1009-2 (sort)

Til bruk etter fettsuging og/eller arm- og ryggplastikk. Med glidelås på armer. Hekter foran og bak.

For å finne riktig magebelte, se måletabell F side 11.


For å finne riktig armkompresjon, se måletabell G side 11.



ØRE- OG ANSIKTS-BANDASJE (universal - one size)

Art. nr. 1004 - (kun hvit)


Brukes etter øreoperasjoner og/eller mindre ansiktsoperasjoner. En størrelse til barn og voksne. Lukkes med borrelås. To ekstra stropper som kan festes valgfritt for ekstra komfort og sikre at bandasjen ikke sklir (for eksempel på natten).

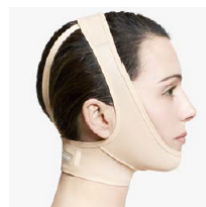

STANDARD ANSIKTSBANDASJE

Art.nr.1003 (kun beige)

Ansiktsbandasje til bruk etter ansiktsoperasjoner. Lukkes med borrelås. Unisexmodell.

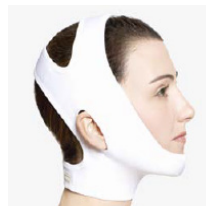

FORSTERKET ANSIKTSBANDASJE

Art.nr. 1002 (kun hvit)


Forsterket ansiktsbandasje til bruk etter ansiktsoperasjoner. Lukkes med borrelås.

Selvklebende silikonbandasje


- klinisk dokumentert arrbehandling av nye og gamle arr




Plaster

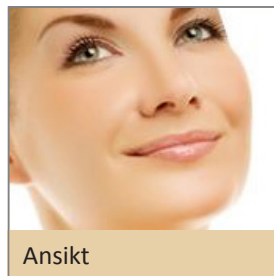

Ansikt

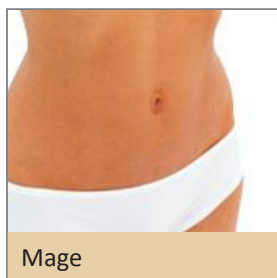

Mage

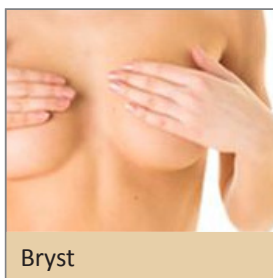

Bryst




Gel

NewGel er selvheftende silikonbandasjer for behandling av arr. NewGel gjør arret mer mykt og jevnt, bleker røde og irriterte arr og reduserer kløe. Etter operasjon opplever noen at arrene blir hovne, røde og harde. Med behandling av NewGel silikonbandasje over tid, vil arrene kunne forbedres.


NewGel kan brukes for behandling ved hypertrofiske arr, (arr med unormalt mye arrevev) og keloid arr (store, faste og ofte med glatte og harde utvekster), brannskadearr – gamle og nye arr. Brukes også for å forebygge hypertrofiske og keloide arr. Bandasjen finnes i mange størrelser og former.

Produktoversikt

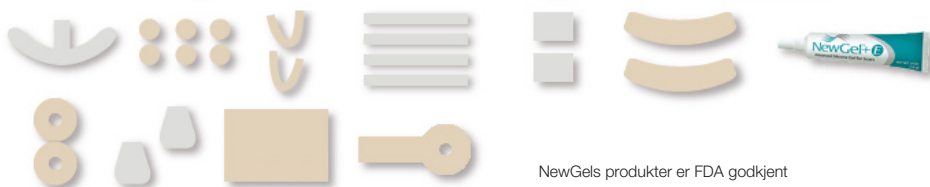

NewGels produkter er FDA godkjent

Måletabell BH og kompresjonstøy - Kvinner

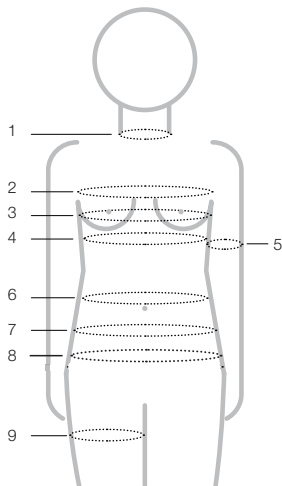

1. Omkrets rundt hals/hakke
2. Omkrets over bryst (anatomiske brystbånd og sportsmodeller: D)
3. Omkrets over busten
4. Omkrets under busten
5. Omkrets overarm
6. Omkrets midje
7. Omkrets mage (ca 3-4 cm under navle)
8. Omkrets hofte
9. Omkrets lår (mellom skritt og kne)

Måletabell A Kompresjonsklær med ben kvinner			
Størrelse	Midje (6)	Hofte (8)	Lår (9)
70 (XXXXS)	54-58	80-85	43-46
75 (XXXS)	58-64	85-90	46-49
80 (XXS)	64-68	90-95	49-52
85 (XS)	68-72	95-100	52-55
90 (S)	72-76	100-105	55-58
95 (M)	76-80	105-110	58-61
100 (L)	80-85	110-115	61-64
105 (XL)	85-90	115-120	64-67
110 (XXL)	90-95	120-125	67-69
115 (XXXL)	95-100	125-135	69-71

Måletabell B Body borrelås/hekter	
Størrelse	Mage (7)
XXS	60-70
XS	70-80
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130


Måletabell D Anatomisk brystbånd	
Str.	fra armhule over bryst (2)
S	74-83
M	83-92
L	92-101
XL	101-116

Måletabell C BH - For de fleste måles det kun under bryst. Sjekk egen størrelsesliste for de ulike modeller.				
Størrelse	Under busten (4)	Over busten (3) B cup	Over busten (3) C cup	Over busten (3) D cup
80 (XXS)	63-67	78-82	82-85	85-88
85 (XS)	68-72	83-87	87-90	90-93
90 (S)	73-77	88-92	92-95	95-98
95 (M)	78-82	93-97	97-100	100-103
100 (L)	83-87	98-102	102-105	105-108
105 (XL)	88-92	103-107	107-110	110-113
110 (XXL) *	93-97	108-112	112-115	115-118
115 (XXXL) *	98-102	113-117	117-120	120-123
120 (XXXXL)*	103-107	118-122	122-125	125-128
125 (XXXXXL)*	108-112	123-127	127-130	130-133

* BH-størrelse 110-125 fås **kun** i Mima-2001 N

Måletabell kompresjonstøy - Menn

Måletabell E Vest, bukser og drakt for menn			
Størrelse	Maksimum Bryst- kasse (2)	Midje (6)	Lår (9)
70 (XXXXS)	85-90	75-80	41-43
75 (XXXS)	90-95	80-85	43-46
80 (XXS)	95-100	85-90	46-49
85 (XS)	100-105	90-95	49-52
90 (S)	105-110	95-100	52-55
95 (M)	110-115	100-105	55-58
100 (L)	115-120	105-110	58-61
105 (XL)	120-125	110-115	61-64
110 (XXL)	125-130	115-120	64-67
115 (XXXL)	130-135	120-125	67-70

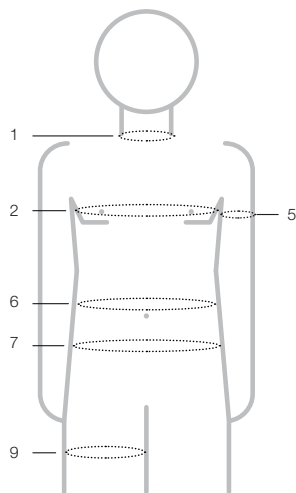

1. Omkrets hals/nakke
2. Omkrets brystkasse
5. Omkrets overarm
6. Omkrets midje (over hoften)
7. Omkrets nedre del av mage
9. Omkrets lår (mellom kne og skritt)

FORKLARING TIL MÅL (Gjelder alle). NB: Ikke stram målebåndet.

Midjemål: Mål mellom ribbein og hofte. Dersom det er vanskelig å finne riktig sted, be kunden sette hånden på hoften og ribbein og mål midt i mellom.

Magemål: 3-4 cm under navlen.

Hoftemål: I de fleste tilfeller er dette det viktigste målet. Mål direkte på hoften under midjen. Dersom det er vanskelig å finne riktig sted, be kunden sette hånden på riktig sted. Hos noen er hoftemål slik bildet viser, hos andre kan det være i samme høyde som navle.

Overarm: Måles midt på overarmen, mellom armhull og albue.

Gi ALLTID en størrelse større en hva målet viser.

NB: Ved store kirurgiske inngrep øker risikoen for blodpropp. Vi anbefaler kompresjonsstrømper som supplement for god sirkulasjon i tilhelingsperioden. Selges hos bandagister og de fleste store apotek.

Måletabell kompresjonstøy - Unisex

Måltabell F Magebelte/Brystbelte	
Størrelse	Magebelte (7) Brystbelte (2 Herre)
XS	50-70
S	70-90
M	90-110
L	110-130
XL	130-150

Måltabell G Armkompresjon		
Størrelse	Overarm (5)	Under bysten (4)
XS	21-24	63-70
S	24-27	70-77
M	27-30	77-84
L	30-33	84-91
XL	33-36	91-98
XXL	36-40	98-105

Måltabell H Ansikts-/ hodebandasjer	
Størrelse	Hals/ nakke (1)
S	27-31
M	32-37
L	38-46

Alle mål er oppgitt i cm

Våre produkter selges hos følgende apotek og bandagister:

Boots apotek Alta .

Sørenskriverveien 13. **ALTA**. Tlf: 78 44 41 50

Boots apotek Askim.

Skolegata 11. **ASKIM**. Tlf: 69 81 72 00.

Bandagist 1 Bærum. Frøytnuveien 4.

BEKKESTUA. Tlf: 67 52 58 68.

Boots Apotek Spelhaugen.

Krokattjønnveien 11A. **BERGEN**. Tlf: 55 17 60 10.

Helsekompaniet AS. Jakhelin Brygge, Sjøgata 17.

BODØ. Tlf: 75 53 50 00.

Helsevekst Medikal AS. Ing. Rybergs g 44.

DRAMMEN. Tlf: 32 20 23 50.

Sykepleieservice AS. Storg. 12 (Bjørnulfgården).

FREDRIKSTAD. Tlf: 69 30 13 10.

Sykehusapoteket Bærum. Bærum Sykehus,

Sogneprest Munthe-Kaasvei 100. **GJETTUM**.

Tlf: 67 50 21 74.

Helsebutikken i Grimstad AS.

Juskestredet 2, **GRIMSTAD**. Tlf: 37 04 94 08.

AT Bandagistsenter AS.

Løkengutua 57. **GRINDVOLL**. Tlf: 45 21 13 73.

Hamar Ortopediske.

Torggata 1. **HAMAR**. Tlf: 62 51 19 50.

Lille Lone. Strandgata 65 (inng. Bekkegata). **HAMAR**.

Tlf: 97 40 14 87/ 93 24 76 12.

Boots Apotek Ørnen. Skippergata 11 Hotell Saga.

HAUGESUND. Tlf: 52 70 35 80.

Go'heksene Helse og velvære.

Hofslundveien 1. **HOF**. Tlf: 33 05 93 33.

Banda Ringerike. Flattumsgate 4. **HØNEFOSS**.

Tlf: 32 12 60 00.

Ringen Apotek og Bandagist. Gotaasallen 11.

JESSHEIM. Tlf: 63 97 83 10.

Kongsberg Bandasje eff. AS. Kirkegata 9A.

KONGSBERG. Tlf: 32 73 63 75.

Bandagisten Norengros. Strandgate 12.

KRISTIANSAND. Tlf: 38 53 13 13.

Boots apotek Larvik. Nansetgt. 8.

LARVIK. Tlf: 33 13 24 40.

Norengros Helsebutikken Levanger. Kirkegata 73.

LEVANGER. Tlf: 74 02 80 80.

Lørenskog Bandasje. Skårersletta 18.

LØRENSKOG. Tlf: 67 91 96 72.

Sjukehusapoteket i Molde. Molde Sjukehus.

Parkvegen 81. **MOLDE**. Tlf: 71 20 11 50.

Mosjøen Helsekostsenter AS.

C.M. Havigsgt. **MOSJØEN**. Tlf: 75 17 27 77.

Boots apotek Moss. Dronningens gate 3A.

Amfisenteret. **MOSS**. Tlf: 69 20 46 20.

Bandagist 1 Oslo. Sandakerveien 109. **OSLO**.

Tlf: 21 42 47 48.

Mediq Oslo (tidl. Medicus Plesner AS).

Pilestredet 7. **OSLO**. Tlf: 92 43 49 33.

Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, **OSLO**. Tlf: 23 07 34 13.

Sæter Helsekost og Bandagistforretning.

Ekebergveien 230. **OSLO**. Tlf: 22 28 28 66.

Ringen Apotek og Bandagist. Amodt senter.

Nedre Rælingensvei 261. **RÆLINGEN**.

Tlf: 63 83 43 00.

Boots Apotek Samarit.

Holbergsgaten 15. **SANDNES**. Tlf: 51 60 97 60.

Mosjøen Helsekostsenter AS -

Avd. Sandnessjøen. Torolv Kveldulvsonsg. 27.

SANDNESSJØEN. Tlf: 75 04 20 50.

Boots apotek Lande. Vestre vei 4. Landesentret.

SARPSBORG. Tlf: 69 10 25 70.

Banda Follo Sykepleieartikler. Åsenveien 3, **SKI**.

Tlf: 64 87 70 00.

Sykehusapotek Skien. Ulefossv. 55. **SKIEN**.

Tlf: 35 91 54 00.

Helsebutikken Bekkefaret.

Svend Foyns gate 2A. **STAVANGER**. Tlf: 51 89 42 63.

Straen Sykepleiesenter AS. Lars Hertervigsgate 3A.

STAVANGER. Tlf: 51 84 23 23

Norengros Helsebutikken Steinkjer.

Bogaveien 6. **STEINKJER**. Tlf: 74 02 80 80.

Heimdal Helseartikler. Ringvålveien 10B.

TRONDHEIM. Tlf: 72 84 98 77.

Stückrath AS. Olav Tryggvasonsg. 13.

TRONDHEIM. Tlf: 73 99 44 80.

Ødegaard Norengros Helsebutikken Ålesund.

Keiser Wilhelms gate 24-26. **ÅLESUND**.

Tlf: 70 12 09 00.

Sjukehusapoteket i Ålesund. Ålesund Sjukehus.

Åsehaugen 5. **ÅLESUND**. Tlf: 70 10 66 00.

MEDISTIM

Medistim Norge AS, Postboks 6631 Etterstad, 0607 Oslo. Tlf: 23 03 52 50
Kontakt: norge@medistim.com - www.medistim.no. Man-Fre 09:00-16:00